

EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON


SOCKET & STUMP COMFORT

Manchon prothétique *Prosthetic liner*

Sélectionner la bonne taille de **genouillère de suspension**

1. Faire un repère sur la cuisse à 10 cm au-dessus de la rotule
2. Mesurer la circonférence de la cuisse à ce repère
3. Utiliser cette mesure pour sélectionner la bonne taille de genouillère


Prise de mesures
gaine d'étanchéité :
Measurements

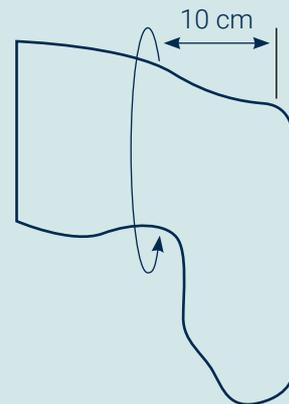

Sélectionner la bonne taille de **manchon**

1. Faire un repère sur le membre résiduel à 6 cm de l'extrémité distale
2. Mesurer la circonférence du membre résiduel à ce repère
3. Utiliser cette mesure pour sélectionner la bonne taille dans les tableaux

Prise de mesures du manchon :
Measurements

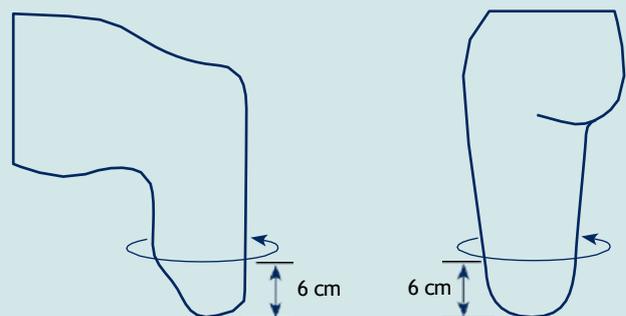

EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET & STUMP COMFORT

Manchon prothétique *Prosthetic liner*

Matériaux

EASYGEL

Effet talqué, contenant des antioxydants aidant au soin de l'état cutané et de la cicatrisation. Idéal pour les patients diabétiques avec une peau sensible se blessant facilement ou présentant des irritations.



GRIP GEL

Effet adhérent aidant à réduire les efforts d'échauffement et de cisaillement, et favorisant une très bonne suspension. Idéal pour les peaux saines.



HAUTE DENSITÉ (HD)

Combinaison du confort du copolymère et de la nervosité du silicone. Idéal pour les patient actifs/sportifs souhaitant un confort supérieur au gel copolymère classique, tout en gardant un bon contrôle de leur prothèse.



SILICONE

Hypoallergénique, sans adjuvant, offrant une facilité d'entretien, une liberté de mouvement et une grande douceur pour la peau.



OPTISIL

Ce silicone blanc de grade médical avec une friction 5 fois moindre que celle du silicone courant, offre un confort supérieur. De moindre épaisseur, il est doux pour la peau, léger et rafraichissant.



OPTIGEL

Toutes les qualités du copolymère sont ici optimisées. Plus d'adaptabilité pour plus de contrôle, plus de confort et plus de sécurité.



Fabrication

TISSU TRICOTÉ
SANS COUTURE



ÉLASTICITÉ VERTICALE
TRÈS RÉDUITE STRETCH



ÉLASTICITÉ VERTICALE
RÉDUITE



ÉLASTICITÉ HORIZONTALE
ET VERTICALE



Suspensions



LOCKING



COLLERETTE



CUSHION

Intensités d'activité



K1

Activité faible



K2

Activité faible à moyenne



K3

Activité moyenne à élevée



K4

Activité élevée à sportif

EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET & STUMP COMFORT

Manchon prothétique *Prosthetic liner*

Pro-Fit® Liner

Réf. ALPS : PFGFR / PFGDT

Le Pro-Fit® Liner est un manchon fabriqué en gel de copolymère « OptiGel ». Il assure une excellente adaptabilité au membre résiduel. Par ailleurs, la cupule de l'accrochage distale offre à l'utilisateur une tenue hautement sécurisée, un contrôle et un confort dans l'emboîture.


Caractéristiques et applications :

- Excellente tenue du manchon sur le membre résiduel
- Sensation de sécurité renforcée
- Pistonnement réduit

Niveau d'activité




Caractéristiques

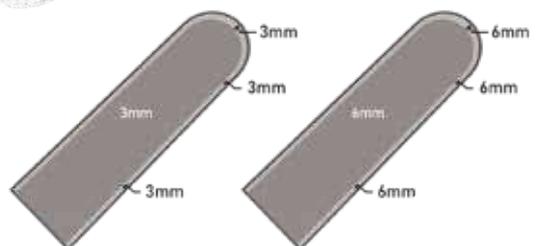

XA48FRZ

XA48FR

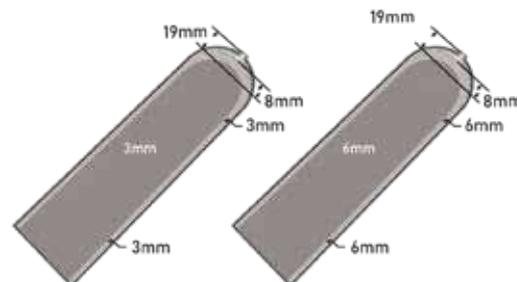

XA48DTZ

XA48DT

TAILLE épaisseur 6 mm*	LOCKING	CUSHION
20-23 cm	XA48DT20	XA48FR20
24-25 cm	XA48DT24	XA48FR24
26-27 cm	XA48DT26	XA48FR26
28-31 cm	XA48DT28	XA48FR28
32-37 cm	XA48DT32	XA48FR32
38-43 cm	XA48DT38	XA48FR38
44-53 cm	XA48DT44	XA48FR44

*Épaisseur 3 mm : ajouter « Z », exemple : XA48DTZ44 ou XA48FRZ44
Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm de l'extrémité distale.

EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET & STUMP COMFORT

Manchon prothétique *Prosthetic liner*

SoftSil® Liner

Réf. ALPS : SSGSL / SSGSC

Le SoftSil® Liner est un manchon en silicone « OptiSil », un nouveau silicone souple et blanc offrant des qualités de grade médical. Grâce à son tissu tricoté gris, ce manchon offre un contrôle élevé et une excellente liberté de mouvement, tout en conservant la suspension confortable de la prothèse.

Caractéristiques et applications :


- Silicone ayant une friction cinq fois moins importante que celle des silicones classiques
- Pistonnement réduit
- Doux pour la peau
- Pour les amputés tibiaux ou fémoraux actifs



Niveau d'activité



Caractéristiques

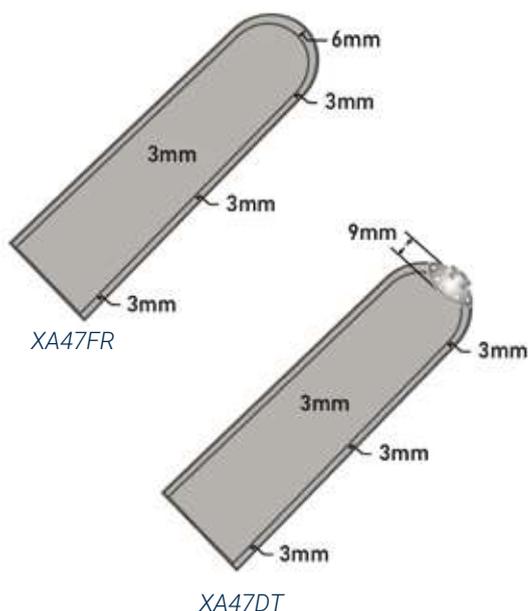

TAILLE Épaisseur 3 mm	LOCKING	CUSHION
20-22 cm	XA47DT20	XA47FR20
22-24 cm	XA47DT22	XA47FR22
24-26 cm	XA47DT24	XA47FR24
26-28 cm	XA47DT26	XA47FR26
28-30 cm	XA47DT28	XA47FR28
30-32 cm	XA47DT30	XA47FR30
32-35 cm	XA47DT32	XA47FR32
35-38 cm	XA47DT35	XA47FR35
38-41 cm	XA47DT38	XA47FR38
41-44 cm	XA47DT41	XA47FR41
44-47 cm	XA47DT44	XA47FR44

Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm de l'extrémité distale.

EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET & STUMP COMFORT

Manchon prothétique *Prosthetic liner*

Extreme™ Liner

Réf. ALPS : AKDT / AKFR

L'Extreme™ Liner est un manchon en gel de copolymère (GRIP GEL).

Il réduit de 80% l'étirement vertical, améliore le contrôle et la stabilité du moignon, grâce à son textile de recouvrement anti-pistonnement.


Caractéristiques et applications :

- Gel copolymère collant, permettant une réduction des échauffements
- Étirement vertical limité
- Étirement horizontal optimal, facilite l'ajustement de la forme
- Pour les amputés transtibiaux, transfémoraux avec une activité modérée à actifs

Niveau d'activité



Caractéristiques

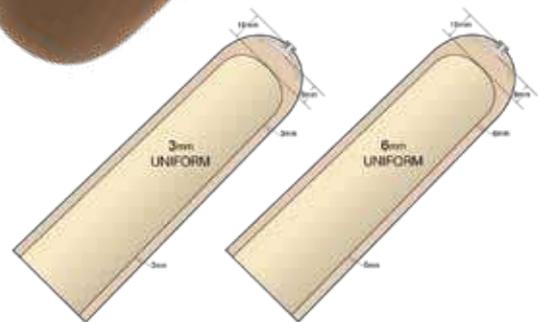

XA38DTZ

XA38DT



XA38FRZ

XA38FR

TAILLE Épaisseur 6 mm*	LOCKING	CUSHION
16-19 cm	XA38DT16	XA38FR16
20-23 cm	XA38DT20	XA38FR20
24-25 cm	XA38DT24	XA38FR24
26-27 cm	XA38DT26	XA38FR26
28-31 cm	XA38DT28	XA38FR28
32-37 cm	XA38DT32	XA38FR32
38-43 cm	XA38DT38	XA38FR38
44-52 cm	XA38DT44	XA38FR44

*Épaisseur 3 mm : ajouter « Z », exemples : XA38DTZ44 ou XA38FRZ44
Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm de l'extrémité distale.

EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET & STUMP COMFORT

Manchon prothétique *Prosthetic liner*

Black Line Tapered®

Réf. ALPS : APDT-TP / APFR-TP

Le manchon Black Line Tapered® est en gel copolymère (GRIP GEL). Son matériau ainsi que son tissu noir, haute performance permettent de réduire les plis dans la région poplitée.

La partie antérieure est affinée, vers la partie postérieure du manchon pour offrir un confort supérieur ainsi qu'une plus grande facilité de flexion de genou.

Caractéristiques :

- Tapered : 6 mm antérieur à 3 mm postérieur
- Réduit les contraintes dans la région poplitée
- Tissu noir haute performance
- Pour les amputés transtibiaux avec une activité modérée à sportif



Niveau d'activité



Caractéristiques



TAILLE Épaisseur : 6/3 mm	LOCKING	CUSHION
20-23 cm	XA41DT20	XA41FR20
24-25 cm	XA41DT24	XA41FR24
26-27 cm	XA41DT26	XA41FR26
28-31 cm	XA41DT28	XA41FR28
32-37 cm	XA41DT32	XA41FR32

Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm de l'extrémité distale.

EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET & STUMP COMFORT

Manchon prothétique *Prosthetic liner*

Skin Liner®

Réf. ALPS : ECDTHD / ECFRHD

Conçu en gel copolymère haute densité, le Skin Liner® offre aux amputés actifs un meilleur degré de contrôle similaire au silicone, tout en préservant le confort du copolymère. La nouvelle trame tissu du Skin Liner® réduit l'étirement distale du manchon.

Grâce à une fabrication économe en énergie, le Skin Liner s'engage dans une approche respectueuse de l'environnement.


Caractéristiques et applications :

- Pistonnement réduit grâce à un tissage réalisé d'un seul tenant
- Nouvelle construction anti-élongation.
- Gel copolymère haute densité (HD) pour un contrôle et un confort accru

Niveau d'activité




Caractéristiques

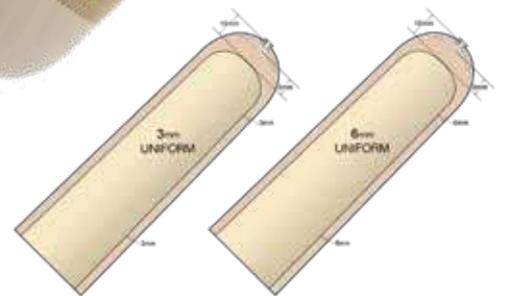

XA44DTZ

XA44DT

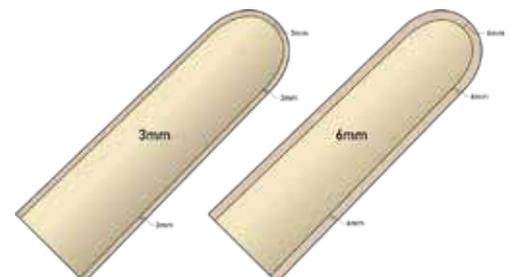

XA44FRZ

XA44FR

TAILLE Épaisseur 6 mm*	LOCKING	CUSHION
16-19 cm	XA44DT16	XA44FR16
20-23 cm	XA44DT20	XA44FR20
24-25 cm	XA44DT24	XA44FR24
26-27 cm	XA44DT26	XA44FR26
28-31 cm	XA44DT28	XA44FR28
32-37 cm	XA44DT32	XA44FR32
38-43 cm	XA44DT38	XA44FR38
44-53 cm	XA44DT44	XA44FR44

*Épaisseur 3 mm : ajouter « Z », exemples : XA44DTZ38 ou XA44FRZ38
Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm de l'extrémité distale.



EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET & STUMP COMFORT

Manchon prothétique *Prosthetic liner*

EasyLiner®

Réf. ALPS : ELDT / ELFR

L'EasyLiner® est un manchon en gel de copolymère contenant des antioxydants avec des effets bénéfiques pour la peau. L'EasyGel offre le confort attendu par vos patients, tout en alliant résistance et élasticité.

C'est notre choix recommandé pour les patients diabétiques ou patients ayant la peau fragile.

Caractéristiques et applications :


- Contient un antioxydant pour les peaux sensibles
- Tapered : 6 mm antérieur à 3 mm postérieur
- Le faible coefficient de friction limite les efforts de cisaillement sur la peau




Niveau d'activité



Caractéristiques

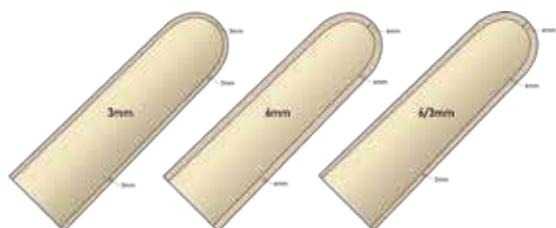

XA35FR

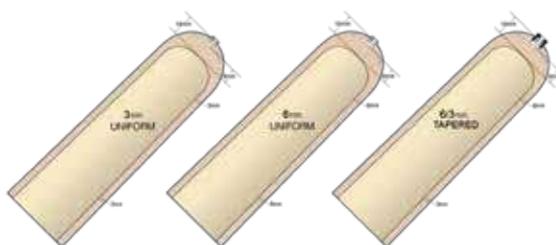

XA35DT

XA35DTTP
XA35FRTP

TAILLE	LOCKING Épaisseur 6 mm*	CUSHION Épaisseur 6 mm*	TAPERED Épaisseur : 6/3 mm
16-19 cm	XA35DT16	XA35FR16	XA35(DTTP ou FRTP)16
20-23 cm	XA35DT20	XA35FR20	XA35(DTTP ou FRTP)20
24-25 cm	XA35DT24	XA35FR24	XA35(DTTP ou FRTP)24
26-27 cm	XA35DT26	XA35FR26	XA35(DTTP ou FRTP)26
28-31 cm	XA35DT28	XA35FR28	XA35(DTTP ou FRTP)28
32-37 cm	XA35DT32	XA35FR32	XA35(DTTP ou FRTP)32
38-43 cm	XA35DT38	XA35FR38	XA35(DTTP ou FRTP)38
44-52 cm	XA35DT44	XA35FR44	XA35(DTTP ou FRTP)44

*Épaisseur 3 mm : ajouter « Z », exemples : XA35DTZ20 ou XA35FRZ20
Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm de l'extrémité distale.

EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET & STUMP COMFORT

Manchon prothétique *Prosthetic liner*

EasyLiner SuperStretch®

Réf. ALPS : ELPX

L'EasyLiner SuperStretch® est un manchon en gel copolymère Easygel contenant des antioxydants avec des effets bénéfiques pour la peau.

Sans tissu de recouvrement, ce manchon permet une liberté totale de mouvement.

Grâce à l'EasyGel, l'EasyLiner SuperStretch® allie confort, résistance et élasticité tout en bénéficiant d'un coefficient de frottement plus faible.

Caractéristiques et applications :

- **Ajustement plus précis et meilleur contact**
- **Contient un antioxydant pour les peaux sensibles**
- **Manchon plus long pour correspondre à la plupart des patients**

Niveau d'activité



Caractéristiques



TAILLE Épaisseur 6 mm	CUSHION
16-19 cm	XA3516
20-23 cm	XA3520
24-25 cm	XA3524
26-27 cm	XA3526
28-31 cm	XA3528
32-37 cm	XA3532

Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm de l'extrémité distale.

EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET & STUMP COMFORT

Manchon prothétique *Prosthetic liner*

EasyFlex™ Liner

Réf. ALPS : EZF

Conçu en EasyGel, gel contenant des antioxydants avec des effets bénéfiques pour la peau, il préservera le bon état cutané des membres résiduels tout en apportant du confort et de la durabilité.

L'EasyFlex™ Liner facilite la flexion du genou par une souplesse d'étirement de la partie antérieure. En partie postérieure, le tissu limite de 80% l'étirement vertical, ce qui réduit les plis dans la région poplitée.

Caractéristiques et applications :


- Fabriqué avec deux tissus à élasticité différente pour faciliter la flexion du genou
- Contient un antioxydant pour les peaux sensibles



Niveau d'activité



Caractéristiques

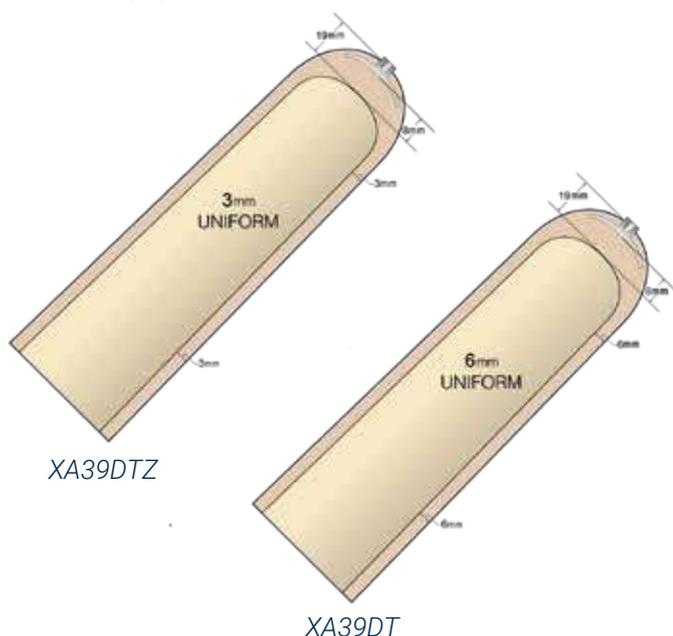

TAILLE Épaisseur 6 mm*	LOCKING
16-19 cm	XA39DT16
20-23 cm	XA39DT20
24-25 cm	XA39DT24
26-27 cm	XA39DT26
28-31 cm	XA39DT28
32-37 cm	XA39DT32
38-43 cm	XA39DT38
44-52 cm	XA39DT44

*Épaisseur 3 mm : ajouter « Z », exemple : XA39DTZ20
Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm de l'extrémité distale.

EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET & STUMP COMFORT

Manchon prothétique *Prosthetic liner*

Smart Seal™ Liner

Réf. ALPS : SAFR / SBFR

Le Smart Seal™ Liner est un manchon à collerette d'étanchéité avec une suspension sécurisée par vide d'air. Conçu en gel copolymère haute densité (HD), il offre aux amputés actifs un meilleur degré de contrôle similaire au silicone, tout en préservant le confort du copolymère. Fabriqué avec nouveau revêtement sans couture, le Smart Seal™ Liner est tricoté d'un seul tenant pour limiter les tensions et possède un coloris moderne.


Caractéristiques et applications :

- Gel copolymère haute densité (HD) pour un contrôle et un confort accru
- Disponible en deux versions, fémorale et tibiale, pour une hauteur de collerette adaptée
- Tibiale : 8 cm de l'extrémité distale
- Fémorale : 12 cm de l'extrémité distale

Niveau d'activité



Caractéristiques

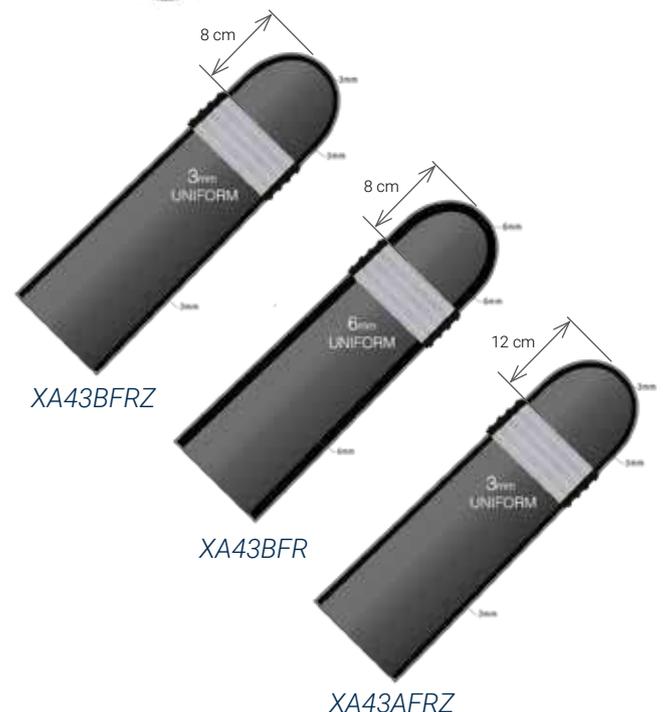

TAILLE	TIBIALE Collerette à 8 cm Épaisseur 6 mm*	FÉMORALE Collerette à 12 cm Épaisseur 3 mm
20-23 cm	XA43BFR20	-
24-25 cm	XA43BFR24	-
26-27 cm	XA43BFR26	XA43AFRZ26
28-31 cm	XA43BFR28	XA43AFRZ28
32-37 cm	-	XA43AFRZ32
38-43 cm	-	XA43AFRZ38

*Épaisseur 3 mm : ajouter « Z », exemple : XA43BFRZ20
Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm de l'extrémité distale.

EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET & STUMP COMFORT

Manchon prothétique *Prosthetic liner*

Generic® Liner

Réf. ALPS : GPDT / GPFR

Le Generic® Liner est un manchon polyvalent conçu en GRIP GEL, alliant confort, résistance et élasticité. L'élasticité de ce manchon prothétique ne restreint pas la circulation sanguine dans le membre résiduel du patient.

Grâce à son textile de recouvrement, il est facile à enfiler et à retirer pour le patient, en particulier pour les personnes âgées ayant des difficultés de préhension.

Caractéristiques et applications :


- Gel copolymère collant, permettant une réduction des échauffements
- Le tissu haute performance garantit une meilleure durabilité
- Manchon universel, recommandé également pour les patients gériatriques avec un état cutané sain



Niveau d'activité



Caractéristiques

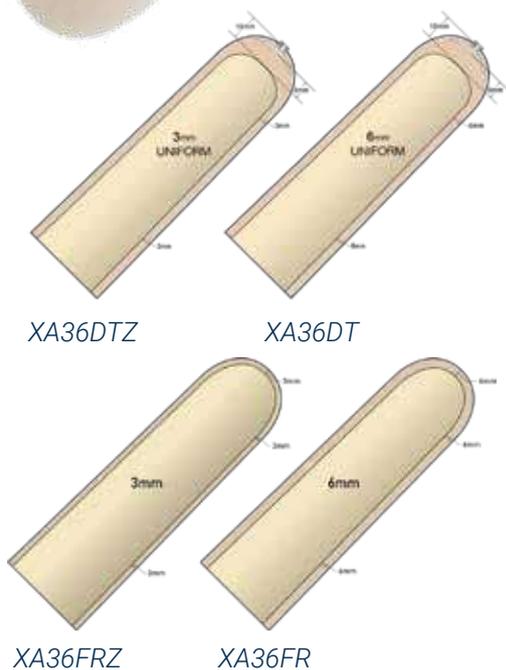

TAILLE Épaisseur 6 mm*	LOCKING	CUSHION
16-19 cm	XA36DT16	XA36FR16
20-23 cm	XA36DT20	XA36FR20
24-25 cm	XA36DT24	XA36FR24
26-27 cm	XA36DT26	XA36FR26
28-31 cm	XA36DT28	XA36FR28
32-37 cm	XA36DT32	XA36FR32
38-43 cm	XA36DT38	XA36FR38
44-52 cm	XA36DT44	XA36FR44

*Épaisseur 3 mm : ajouter « Z », exemples : XA36DTZ20 ou XA36FRZ20
Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm de l'extrémité distale.

EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET & STUMP COMFORT

Manchon prothétique *Prosthetic liner*

Black[®] Liner HD

Réf. ALPS : SPDTHD / SPFRHD

Alliant confort et contrôle de la prothèse, le Black[®] Liner HD est idéal pour les patients actifs.

Le tissu de recouvrement noir haute performance combine résistance, confort et stabilité.


Caractéristiques et applications :

- Tissu haute performance très résistant
- Gel copolymère haute densité (HD) pour un contrôle et un confort accru
- Étirement horizontal élevé pour faciliter l'ajustement de la forme

Niveau d'activité



Caractéristiques

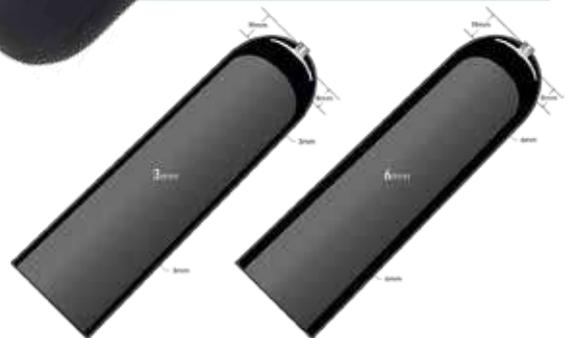

XA42DTZ

XA42DT



XA42FRZ

XA42FR

TAILLE Épaisseur 6 mm*	LOCKING	CUSHION
16-19 cm	XA42DT6	XA42FR16
20-23 cm	XA42DT20	XA42FR20
24-25 cm	XA42DT24	XA42FR24
26-27 cm	XA42DT26	XA42FR26
28-31 cm	XA42DT28	XA42FR28
32-37 cm	XA42DT32	XA42FR32
38-43 cm	XA42DT38	XA42FR38
44-52 cm	XA42DT44	XA42FR44

*Épaisseur 3 mm : ajouter « Z », exemples : XA42DTZ20 ou XA42FRZ20
Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm de l'extrémité distale.

EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET & STUMP COMFORT

Manchon prothétique *Prosthetic liner*

Silicone PRO® Liner

Réf. ALPS : LSC / LSL

Le Silicone PRO® Liner est conçu en silicone ALPS Pro. Pour faciliter l'enfilage et le retrait, il est tricoté avec un revêtement tissu, sans couture.

Caractéristiques et applications :


- Silicone doux pour la peau et profil affiné
- Revêtu de tissu tricoté sans couture pour une liberté de mouvement accrue
- Léger et favorise la thermorégulation naturelle de la peau



Niveau d'activité



Caractéristiques

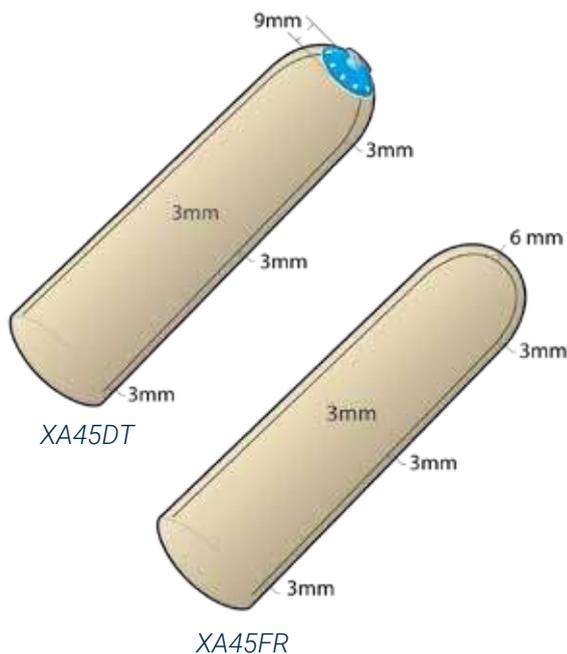

TAILLE Épaisseur 3 mm	LOCKING	CUSHION
14-17 cm	XA45DT14	XA45FR14
16-19 cm	XA45DT16	XA45FR16
18-21 cm	XA45DT18	XA45FR18
20-23 cm	XA45DT20	XA45FR20
22-25 cm	XA45DT22	XA45FR22
24-25 cm	XA45DT24	XA45FR24
26-27 cm	XA45DT26	XA45FR26
28-31 cm	XA45DT28	XA45FR28
30-33 cm	XA45DT30	XA45FR30
32-37 cm	XA45DT32	XA45FR32
35-37 cm	XA45DT35	XA45FR35
38-47 cm	XA45DT38	XA45FR38
44-53 cm	XA45DT44	XA45FR44

Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm de l'extrémité distale.

EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET & STUMP COMFORT

Moyen de suspension *Suspension system*

Flex Sleeve®

Réf. ALPS : SFX

La Flex Sleeve® (SFX) est une genouillère de suspension prothétique avec une construction tricotée sans couture et en gel haute densité (HD) pour fournir un maximum de confort et de durabilité.

La Flex Sleeve® a une pré-flexion de 30° qui facilite la flexion et réduit les plis dans la région poplitée.

Idéale pour les patients actifs comme pour les patients restant en position assise pendant une période prolongée.

La construction 3D du tissu de recouvrement lui permet de réduire les efforts rotuliens.

Caractéristiques et applications :

- Pré-flexion de 30°
- Gel copolymère haute densité (HD)
- Disponible en une longueur qui convient à la plupart des utilisateurs, possibilité d'ajustement en recoupant la longueur dans les parties supérieures et inférieures

Niveau d'activité



Caractéristiques



XA34SFX

TAILLE Épaisseur 3 mm	NOIRE	BEIGE
30 -34 cm	XA34SFX20	XA34SFXBE20
31-40 cm	XA34SFX26	XA34SFXBE26
35-60 cm	XA34SFX32	XA34SFXBE32

Mesurer la circonférence du moignon à 10 cm de l'extrémité distale.

EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET & STUMP COMFORT

Moyen de suspension *Suspension system*

Supérieure Sleeve®

Réf. ALPS : SFB / SFBHD

La Supérieure Sleeve® (SFB) apporte un confort supérieur fourni par le GRIP GEL.

Elle dispose d'un tissu tricoté noir qui permet au patient une grande liberté de flexion du genou.

La SFB garantit une suspension sûre grâce à son excellente adhérence, sans restreindre la circulation et en minimisant les efforts de cisaillements.

Caractéristiques et applications :

- Gel copolymère collant, permettant une meilleure suspension
- Liberté de flexion du genou et solidité
- Suspension sécurisée



Niveau d'activité

Caractéristiques



XA34SFB

TAILLE	Épaisseur 2 mm
25-30 cm	XA34SFB20
31-34 cm	XA34SFB24
35-37 cm	XA34SFB26
38-40 cm	XA34SFB28
41-45 cm	XA34SFB32

Mesurer la circonférence de la jambe 10 cm au-dessus du centre du genou.

EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET & STUMP COMFORT

Moyen de suspension *Suspension system*

EasySleeve®

Réf. ALPS : SFR

L'EasySleeve ReinforcedFabric® (SFR), genouillère de suspension prothétique, procure un confort supérieur grâce à l'effet talqué de l'EasyGel. L'élasticité du tissu permet au patient une excellente liberté de flexion du genou.

La SFR permet une suspension sûre grâce à une adhérence non-agressive avec la peau, sans restreindre la circulation. De plus, la réduction du coefficient de friction observée avec l'EasyGel contribue à atténuer les efforts de cisaillement exercés sur la peau.


Caractéristiques et applications :

- **Tissu de recouvrement solide, facilitant le glissement lors du chaussage**
- **Souplesse et liberté de flexion du genou**
- **Gel effet talqué contenant un antioxydant pour une utilisation sur peau délicate**

Niveau d'activité



Caractéristiques

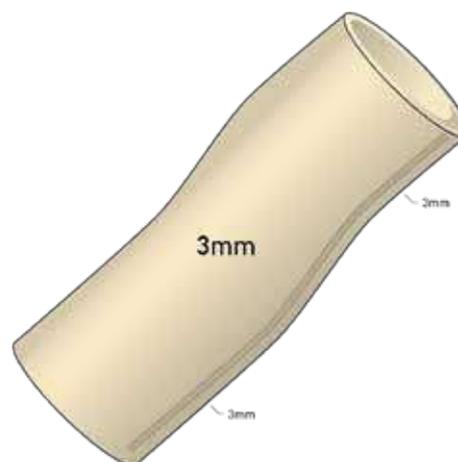

XA32FR

TAILLE	Épaisseur 3 mm
25-30 cm	XA32FR20
31-34 cm	XA32FR24
35-37 cm	XA32FR26
38-40 cm	XA32FR28
41-45 cm	XA32FR32
46-60 cm	XA32FR38
61-70 cm	XA32FR44

Mesurer la circonférence de la jambe 10 cm au-dessus du centre du genou.

EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET & STUMP COMFORT

Moyen de suspension *Suspension system*

Easy Sleeve SuperStretch®

Réf. ALPS : XA32 (SLE)

Fabriqué en gel copolymère EasyGel, l'EasySleeve SuperStretch® combine confort, résistance et élasticité. L'absence de tissu de recouvrement améliore la flexion du genou tout en sécurisant la suspension grâce à l'adhérence, sans entraver la circulation et en réduisant les contraintes exercées sur la rotule.

Caractéristiques et applications :

- Minimise la compression et l'irritation proximale
- Plus longue pour une adaptabilité accrue, elle peut être ajustée à la longueur souhaitée
- Contient un antioxydant pour les peaux sensibles
- Recommandé pour les prothèses de bain



Niveau d'activité



Caractéristiques



XA32

TAILLE	Épaisseur 6 mm
16-19 cm	XA3216
20-23 cm	XA3220
24-25 cm	XA3224
26-27 cm	XA3226
28-31 cm	XA3228
32-37 cm	XA3232

Mesurer la circonférence de la jambe 10 cm au-dessus du centre du genou.

EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET & STUMP COMFORT

Moyen de suspension *Suspension system*

SILIPOS


Genouillères copolymères

Copolymer sleeves

Référence	XS130			
Type - Type	Genouillère copolymère avec textile - <i>Copolymer sleeve with outside fabric only</i>			
Application - Use	Activité faible - <i>Low activity</i>			
Mesures - Measures	Mesurer la circonférence à 15 cm au dessus du genou <i>Circumference taken 15 cm above patella</i>			
Tailles - Sizes	28 - 43 cm 5	33 - 51 cm 6	35 - 56 cm 7	38 - 71 cm 8
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la taille - Ex. : XS1306 <i>Give the reference and the size - Ex. : XS1306</i>			




Référence	XS131		
Type - Type	Genouillère copolymère avec textile et renfort intérieur <i>Copolymer sleeve with outside and inside fabric</i>		
Application - Use	Activité faible à moyenne - <i>Low to moderate activity</i>		
Mesures - Measures	Mesurer la circonférence à 15 cm au dessus du genou <i>Circumference taken 15 cm above patella</i>		
Tailles - Sizes	28 - 43 cm 0	32,5 - 51 cm 1	35 - 56 cm 2
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la taille - Ex. : XS1311 <i>Give the reference and the size - Ex. : XS1311</i>		

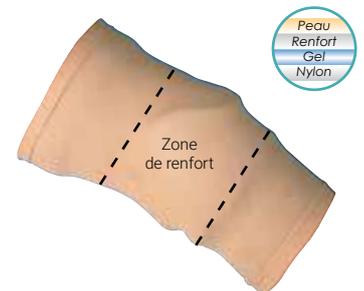

- **Hyperflexible** *Hyperflexible*
- **Confort** *Confort*

Prise de mesures :

Measurements

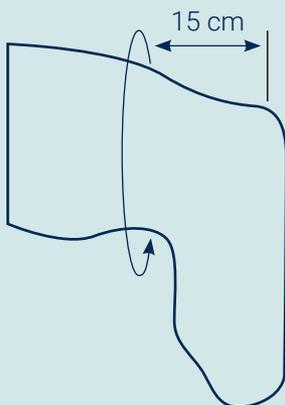

Gel copolymère enrichi d'une huile minérale permettant à la fois de protéger le membre résiduel des pressions et frottements mais également de l'hydrater.

Copolymer gel based on a vitamin enhanced mineral oil protects the skin, from pressure and friction strengths while moisturizing and softening it.